


Hyper AIR[®] hybrid

- COLCHÓN HÍBRIDO DE CELDAS DE AIRE -




VER AHORA
en YouTube!

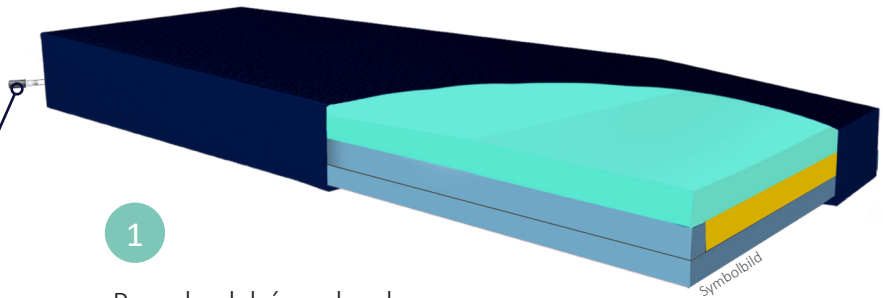

1

Pon el colchón sobre la cama.
Tenga en cuenta el „THIS SIDE
UP“ impreso en la parte superior
del colchón.

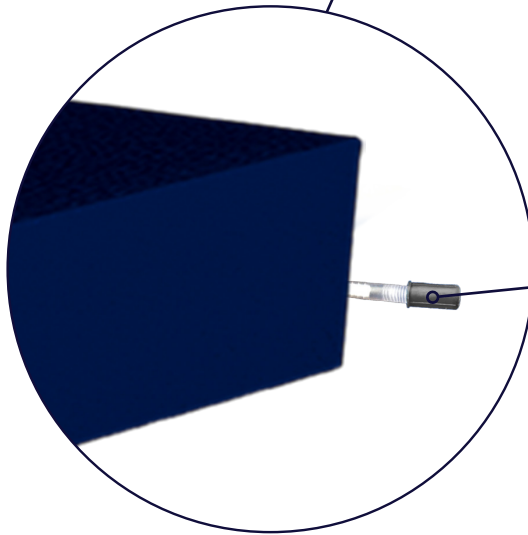

2

Abra la válvula tirando hacia afuera el
cierre azul y espere 5 minutos hasta
que las celdas de aire se hayan inflado
automáticamente ellas solas.

3

Cierre la válvula
presionando hacia
adentro.

(El cierre azul no puede separarse por completo.)

4

Acueste al paciente sobre el colchón.
Abra con cuidado la válvula tirando de
la tapa gris para permitir que el aire
escape y al mismo tiempo haga una
prueba con los dedos*.

5

Cierre la válvula
presionando hacia
adentro.

6

Se recomienda la verificación diaria
del llenado correcto de las celdas de
aire. Puede ser necesario un ajuste.

*(*Ponga una mano debajo de las nalgas. La
comodidad óptima para estar tumbado se
consigue cuando sólo es posible un ligero
movimiento de los dedos de 1 a 2,5 cm.)*