



JETZT ANSEHEN  
auf YouTube!



- LUFTZELLEN-SITZKISSEN-  
Für aktive Rollstuhlfahrer!




Griff für den  
einfachen Transport

Weiche Schutzabdeckung  
mit Klettverschluss




1

Schutzabdeckung nach  
oben klappen.

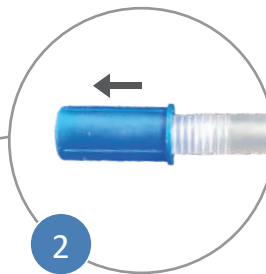

2

Ventil durch Ziehen öffnen und  
ca. 30 Sekunden warten, bis sich  
die Luftkissen selbstständig  
aufgeblasen haben.  
(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)

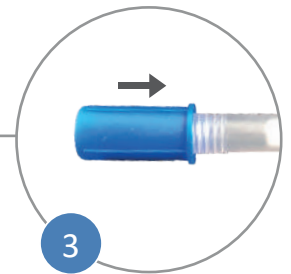

3

Ventil durch  
Drücken schließen.




4

Kissen auf die Sitzfläche des  
Rollstuhles oder Sitzes legen.


(Der Haltegriff muss nach vorne und die darauf  
angebrachten Pfeile müssen nach oben zeigen.)

Auf das Kissen setzen.

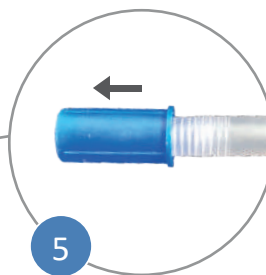

5

Vorsichtig das Ventil  
wieder öffnen bis der ideale  
Sitzkomfort erreicht ist.

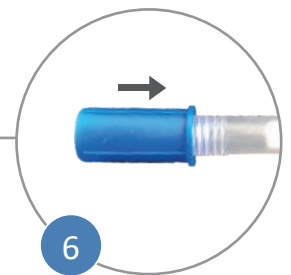

6

Ventil wieder schließen.  
Danach die Schutzabdeckung  
wieder nach unten klappen.