



VER AHORA  
en YouTube!



Imagen de icono


Asa para transporte fácil

Funda protectora suave  
con cierre de velcro




1

Levante la solapa protectora.

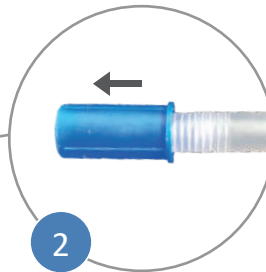

2

Abra la válvula tirando hacia afuera el cierre azul y espere 30 segundos hasta que las celdas de aire se hayan inflado automáticamente ellas solas.  
(El cierre azul no puede separarse por completo.)

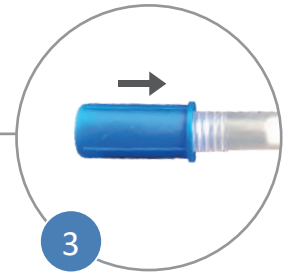

3

Cierre la válvula presionando hacia adentro.




4

Coloque el cojín en la silla de ruedas o asiento.

(El tubo debe estar orientado hacia el frontal y las flechas apuntando hacia arriba.)

Siéntese en el cojín.

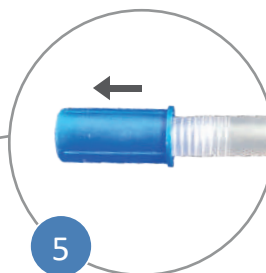

5

Abra la válvula cuidadosamente hasta conseguir un confort ideal en sedestación.



6

Cerrar la válvula y la solapa protectora.