



Einstellen des optimalen Liegekomforts:

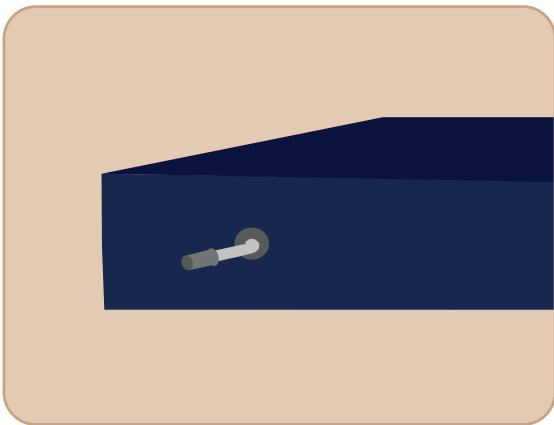


- 1.** Die Matratze auf das Bett legen.
Den Aufdruck „This side up“ beachten.

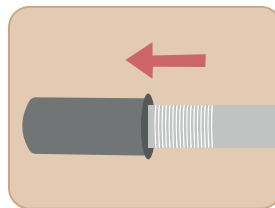


- 2.** Das Ventil durch Ziehen öffnen und ca. 5 Minuten warten, bis sich die Luftzellen selbstständig aufgeblasen haben.

Die Ventilkappe kann nicht herunterfallen.

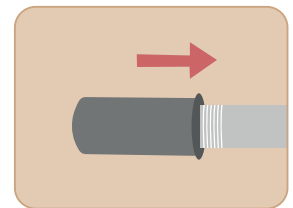


- 3.** Das Ventil durch Drücken schließen.

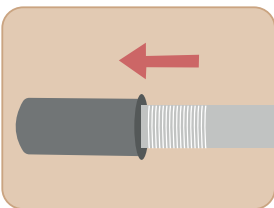


- 4.** Legen Sie den Patienten auf die Matratze. Öffnen Sie vorsichtig das Ventil durch Ziehen der Kappe, damit Luft entweicht und führen Sie gleichzeitig einen Fingertest* durch.

**Führen Sie eine Hand unter das Gesäß. Der optimale Liegekomfort ist erreicht, wenn nur noch eine geringe Fingerbewegung von 1 – 2,5 cm möglich ist.*

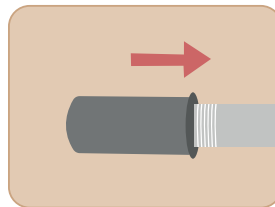

- 5.** Das Ventil durch Drücken schließen.

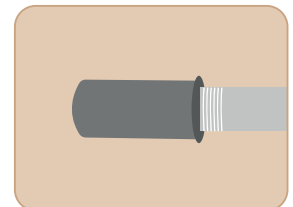

- 6.** Die tägliche Überprüfung der richtigen Befüllung der Luftkammern wird empfohlen, ggf. ist eine Anpassung notwendig.