


HEMOCARE MIT SYSTEM



 **Hyper AIR[®] hybrid**


- LUFTZELLEN-MATRATZE -

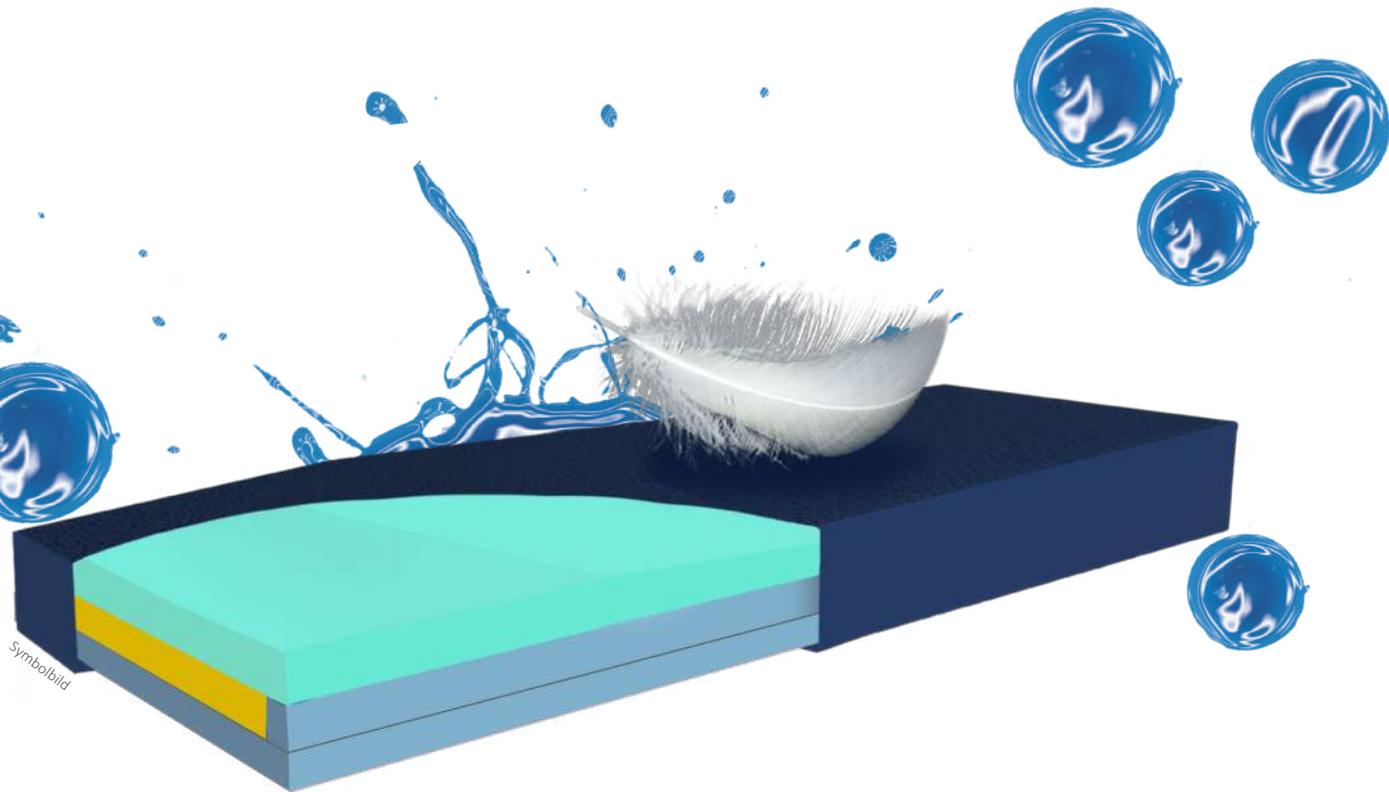

HILFSMITTELNUMMER

11.29.13.0001

Überreicht durch:

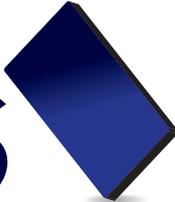PRS 
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Scale)

HMV-Nr.
11.29.13.0001

Oberplatte:
ECOLAST®-Foam

Visco-Foam

Mit wasserdampfdurchlässigem
PU-Inkontinenzbezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 95°C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet*²
- Ultraschall verschweißte Nähte
- Reißverschlussüberdeckung

Größe

Höhe 16 cm
Länge Siehe aktuelle Preisliste
Breite Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:



- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen

Hyper AIR® hybrid

Dekubitustherapie-Luftzellen-Matratze

5 JAHRE
GARANTIE

*1

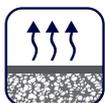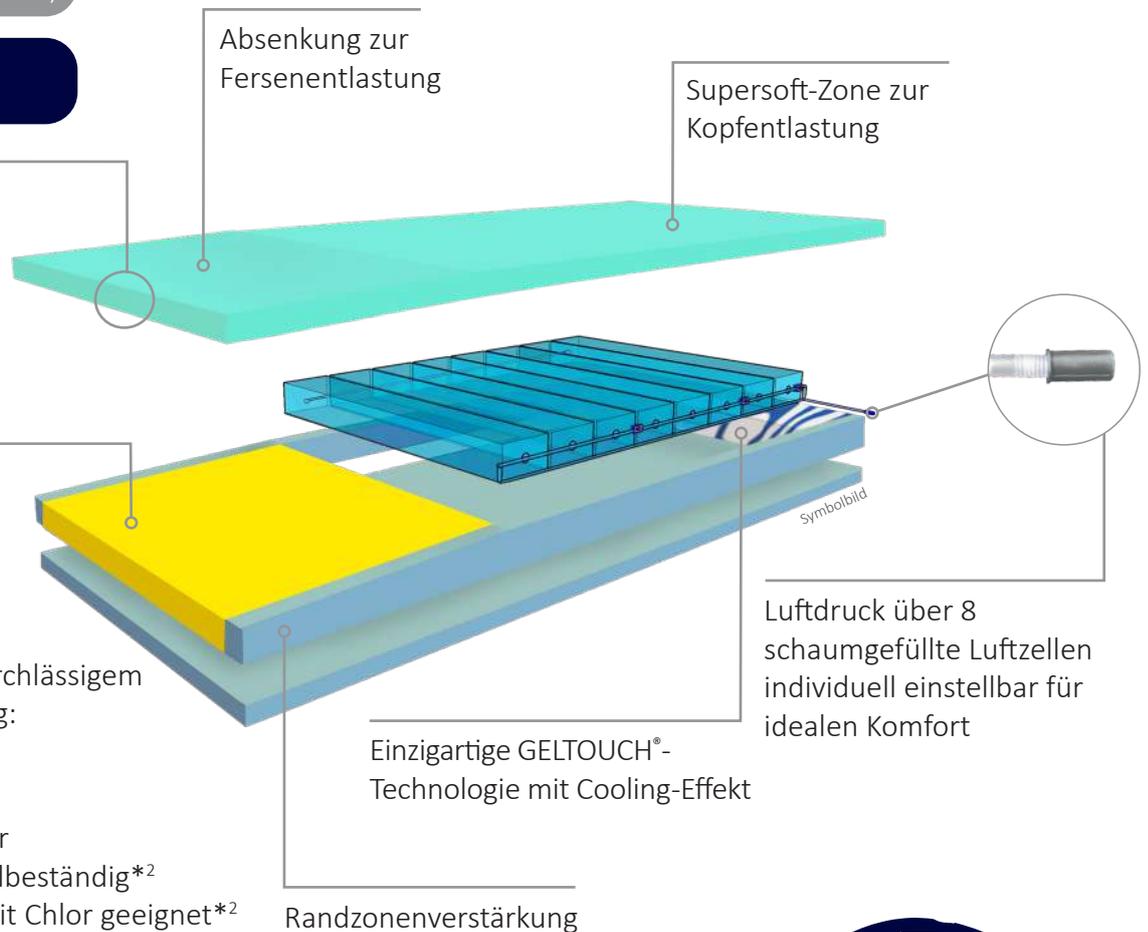

Offenporiger
atmungsaktiver
GELTOUCH®-Foam
+ ECOLAST®-Foam
+ Visco-Foam



Autoklavierbar



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
< 18 mmHg



Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Kein Ausfallrisiko durch
selbstaufblasende
FOAM-IN-CELL-
TECHNOLOGIE



Kein Strom
erforderlich



Max. 5000 ppm




Patientengewicht:
0 bis 250 kg

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.



JETZT ANSEHEN
auf YouTube!

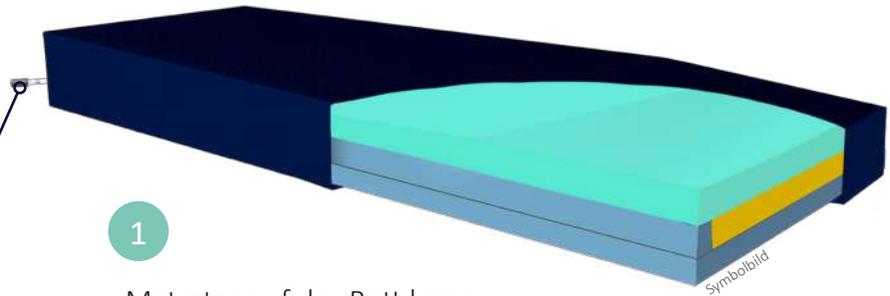

1

Matratze auf das Bett legen.
Bitte beachten Sie den Aufdruck
„THIS SIDE UP“.

2

Ventil durch Ziehen öffnen und
ca. 5 Minuten warten, bis sich
die Luftzellen selbstständig
aufgeblasen haben.

(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)

3

Ventil durch
Drücken schließen.

4

Legen Sie den Patienten auf die
Matratze. Öffnen Sie vorsichtig das
Ventil durch Ziehen der grauen Kappe,
damit Luft entweicht und führen Sie
gleichzeitig einen Fingertest* durch.

**Führen Sie eine Hand unter das Gesäß. Der
optimale Liegekomfort ist erreicht, wenn nur
noch eine geringe Fingerbewegung von
1 – 2,5 cm möglich ist.*

5

Ventil durch
Drücken schließen.

6

Tägliche Überprüfung der richtigen
Befüllung der Luftkammern wird
empfohlen, ggf. ist eine Anpassung
notwendig.